

SCHEDA TECNICA PRODOTTO**DISPOSITIVO: MASCHERINA FFP2 contro Covid 19****EN 149:2001+A1 modificato codice PPE-R/ 02.75 versione 2****Codice: MSQ026****Colore: bianco****CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Omologata secondo lo standard EN 149:2001 +A1:2009 modificato codice PPE-R/ 02.75 versione 2
- Marchio CE (CE082) – Fabbricata in Francia
- Garanzia della mascherina FFP contro Covid 19:
 - Filtrazione minima del 94% delle particelle in sospensione (dimensione media 0.6 µm)
 - Resistenza respiratoria (ispirazione-espiazione) provata e conforme
- Prodotta in polipropilene non tessuto con 4 strati
- 2 passanti per le orecchie senza lattice. Barretta di regolazione a livello del naso
- Misura unica – Dimensioni in posizione appiattita 160x105mm (senza l'elastico)
- Confezione da 30 mascherine – dimensioni: 13 x 13 x 11,5 cm
Cartone da 30 confezioni – Pallet da 480 cartoni
- Morbida e comoda da indossare
- Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi UV tra -20°C e 40°C
Durata di vita: 4 anni dalla data di fabbricazione

**Indossare
massimo
8 ore**

Per nostro Servizio Clienti.

Note: Le informazioni riportate in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze attuali.

Non rappresentano alcuna forma di garanzia del prodotto e non implicano alcun rapporto giuridico contrattuale

EMPTEEZY IT*Agire per il tuo ambiente***SCHEDA TECNICA PRODOTTO****DISPOSITIVO: MASCHERINA FFP2 contro Covid 19****EN 149:2001+A1 modificato codice PPE-R/ 02.75 versione 2****Codice: MSQ026****Colore: bianco****MODO D'USO:**

- Lavarsi le mani (sapone o gel idroalcolico) prima di toccare la mascherina
- Posizionare i passanti intorno alle orecchie e sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca
- Utilizzare la barretta di regolazione sul naso in modo da avere la massima adesione al viso
- Controllare la tenuta: ispirando la mascherina deve aderire maggiormente al viso
- Non toccare più la mascherina con le mani e prenderla per i passanti per sostituirla
- Dopo l'utilizzo, gettare immediatamente nei rifiuti domestici e lavarsi nuovamente le mani

Indossare
massimo
8 ore

Avvertenza : Non utilizzare in prossimità di fiamme

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Servizio Clienti.

Note: Le informazioni riportate in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze attuali.

Non rappresentano alcuna forma di garanzia del prodotto e non implicano alcun rapporto giuridico contrattuale

EMPTEEZY ITALIA S.r.l. Via Podere della vigna, 9 - 20019 Settimo Milanese - MI - Tel. +3902 3288131
mail: info@empteezy.it web: www.empteezy.it